



Fijar y listo

Solo tiene que colocarlo y fijarlo. No es necesario hidratar.

Úselo cuando necesite:

- Añadir propiedades antibacterianas para evitar una infección
- Absorber exudación moderada o abundante
- Administrar terapia compresiva
- Colocar un yeso de contacto total

Uso:

- Colocar y fijar, sin necesidad de hidratar
- No es necesario un apósito adicional
- Colocar una cinta o venda para fijarlo

Paso 1. Elegir un tamaño y aplicar




Elija el tamaño adecuado para asegurarse de que el apósito cubra toda la herida.

Uso con compresión



El apósito Hydrofera Blue READY puede usarse con vendas de compresión y yesos de contacto total.

Paso 2. Cubrir

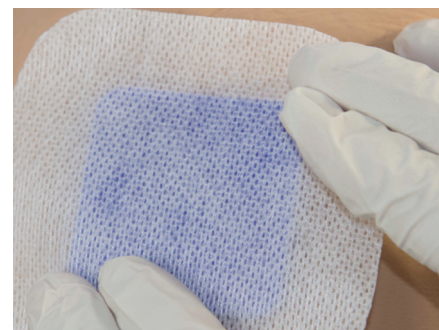

Fije el apósito Hydrofera Blue READY con un apósito de fijación (p. ej., con cinta adhesiva).

Duración



Puede usar el mismo apósito hasta 7 días en función del grado de exudación y de las características clínicas de la herida.

Información de pedido del apósito Hydrofera Blue READY

N.º de producto	Tamaño del producto	Cantidad/caja
HBRS2520	6,4 cm x 6,4 cm (2,5" x 2,5")	10
HBRS4520	10,2 cm x 12,7 cm (4" x 5")	10
HBRS8820	20,3 cm x 20,3 cm (8" x 8")	10

Para obtener más información, lea las instrucciones que se incluyen con el producto.

El fabricante de los apósitos Hydrofera es Hydrofera, LLC, 340 Progress Drive Manchester, CT 06042, Estados Unidos www.hydrofera.com